



ROLLSTUHL- MONTAGE

DER ROLLSTUHL WIRD IM
HINTEREN BEREICH DES
FAHRZEUGES MONTIERT.




Spitex-Mobile

Bahnhofstrasse 17 - 19

9326 Horn

Tel. 071 846 88 60

www.spitex-mobile.ch

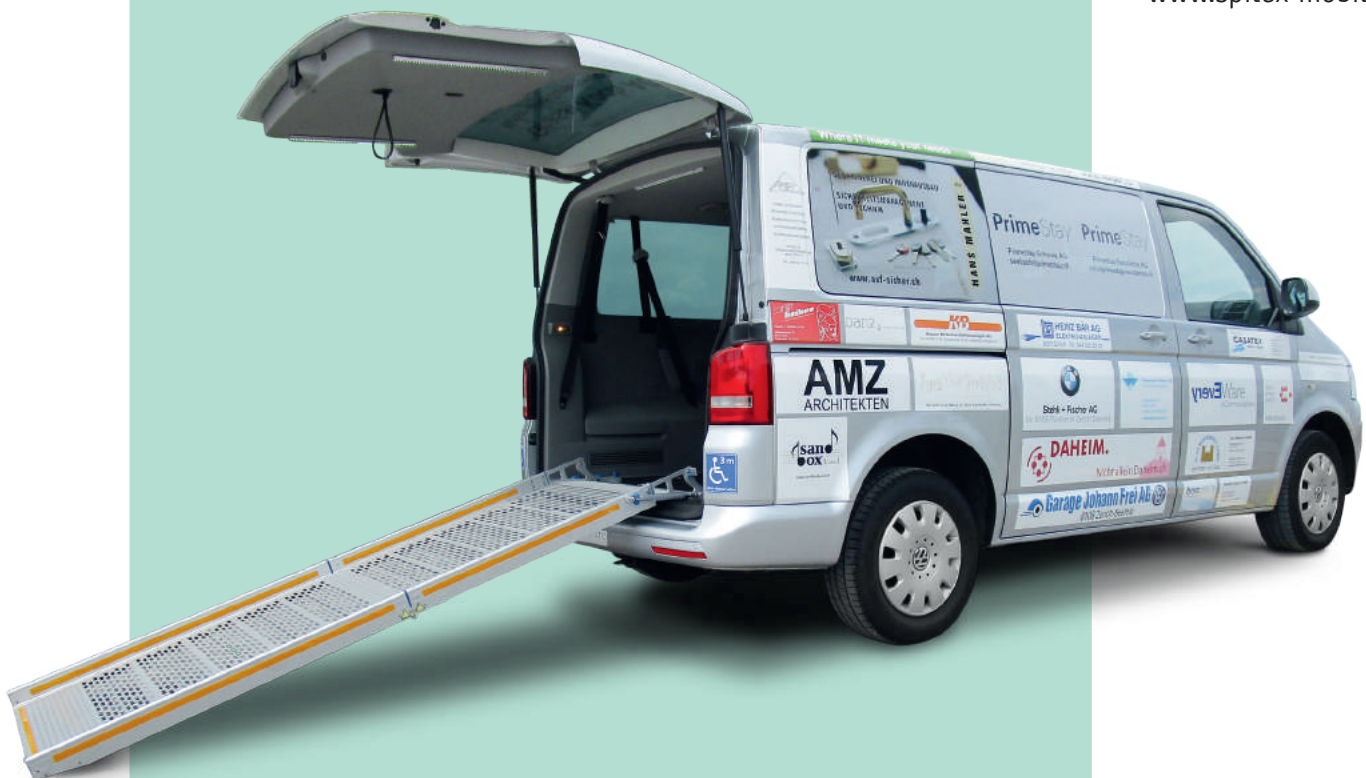

Rollstuhl + 5 bis 6 Personen finden Platz




1



Je nach Rampenmodell muss die Rampe vor dem Ausklappen, wie auf Bild 2 beschrieben, links und rechts gelöst werden.

2

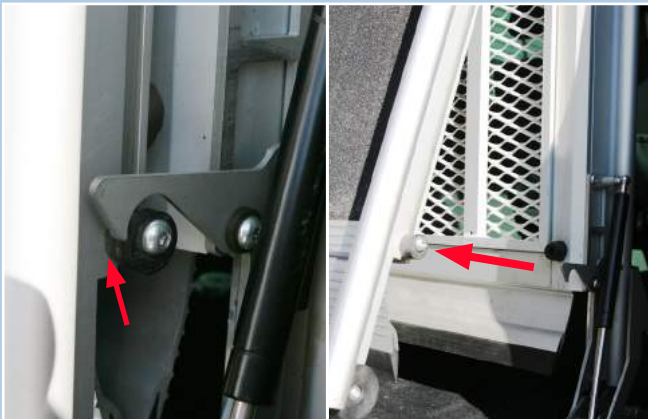

Rampe auf beiden Seiten lösen.

3



Einen Griff, um die Rampe ganz herunter zu klappen, befindet sich seitlich an der Rampe.

Um den Rollstuhl im hinteren Bereich des Fahrzeuges zu montieren, muss die hintere Sitzreihe herausgenommen werden.




Befestigen Sie die vier Retraktoren aus der grauen Kiste (falls noch nicht montiert) an den dafür vorgesehenen Stellen am Fahrzeugboden.

4




Achten Sie darauf, dass der Sicherungsrippel auf der rechten oder linken Seite steht.

5

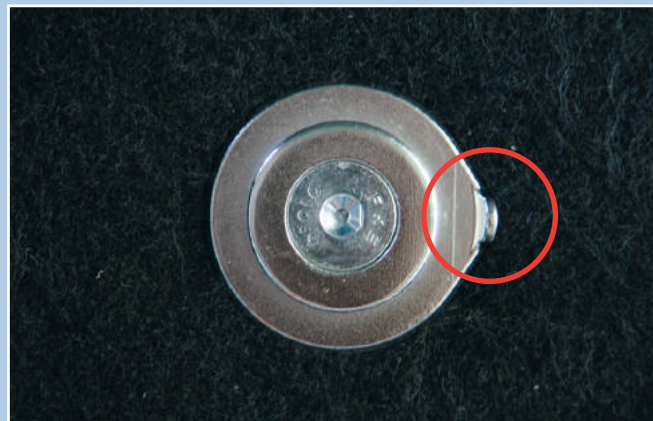


Rasten Sie den Retraktor wie bei einer Schiene am Bodenpunkt ein.

6

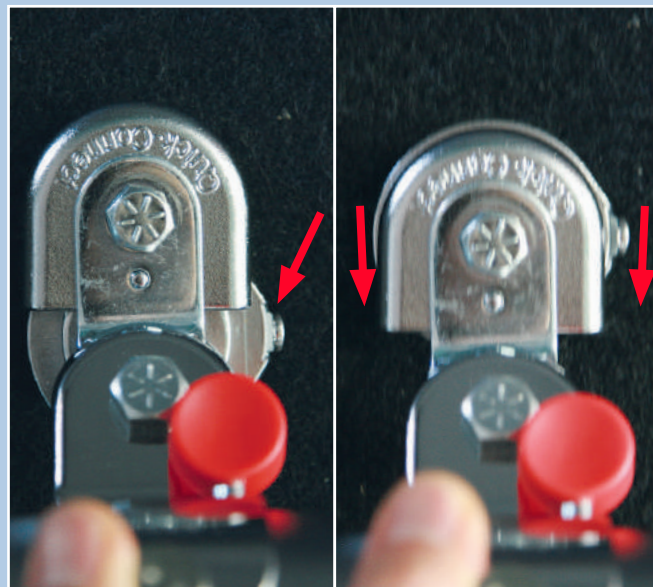




7

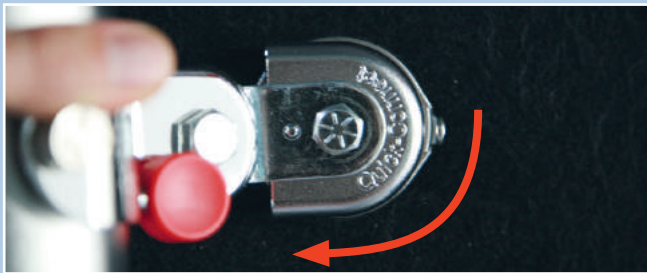

Drehen Sie die Halterung so, dass der Retraktor durch den Nippel gesichert ist.

8

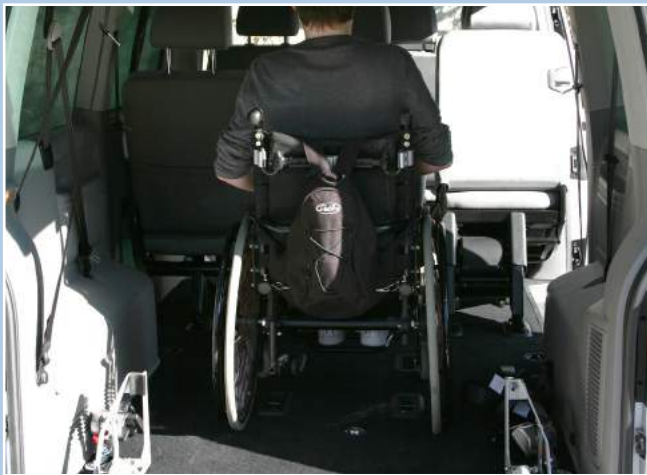

Platzieren Sie den Rollstuhl im Fahrzeug an der gewünschten Stelle.

9



Ziehen Sie die vorderen beiden Gurten aus dem Retraktor und befestigen Sie diese am FESTEN und SICHEREN Rahmen des Rollstuhls, nicht an den Rädern!

10



Die angezogenen Gurten können durch Drücken des roten Knopfes am Retraktor wieder gelöst werden. Angezogen werden sie mit dem schwarzen, seitlichen Griff.



Ziehen Sie die Bremsen des Rollstuhls fest.
(Dies kann auch später gemacht werden.)



Ziehen Sie die hinteren beiden Gurten aus dem Retraktor und befestigen Sie diese am FESTEN Rahmen des Rollstuhls, nicht an den Rädern!



Achtung:

Befestigen Sie die hinteren Gurten in einer geraden Linie zu den Retraktoren so, dass bei einem abrupten Zug nur am Rahmen des Rollstuhls gezogen wird. Falls dies nicht möglich ist, können auch die gelb umkreisten Retraktoren verwendet werden.





14



In der grauen Kiste finden Sie dieses Gegenstück der Gurte.

15



Klicken Sie diese Gurte hinten rechts auf dem Retraktor ein.

16




Benutzen Sie zum Angurten der Person die dafür extra montierte Gurte im hinteren Teil des Fahrzeuges.

17



Verbinden Sie die Gurten miteinander.

Die Rampe wieder hochklappen und los geht die Fahrt!

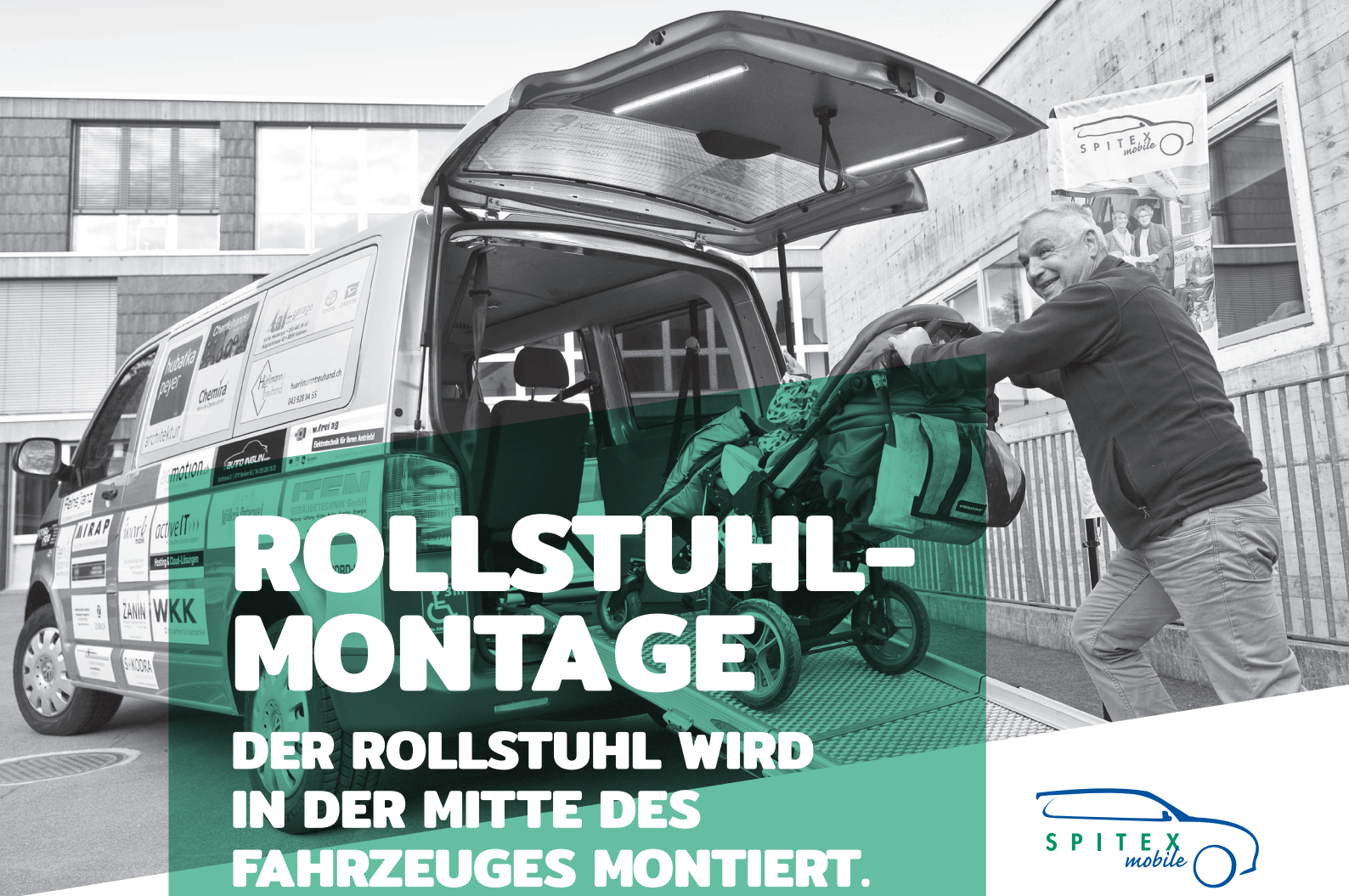

ROLLSTUHL- MONTAGE

DER ROLLSTUHL WIRD
IN DER MITTE DES
FAHRZEUGES MONTIERT.



Spitex-Mobile

Bahnhofstrasse 17 - 19

9326 Horn

Tel. 071 846 88 60

www.spitex-mobile.ch



**Rollstuhl + 3 bis 4 Personen finden Platz,
sodass eine Person während der Fahrt
neben dem Rollstuhl sitzen kann.**




1



Je nach Rampenmodell muss die Rampe vor dem Ausklappen, wie auf Bild 2 beschrieben, links und rechts gelöst werden.

2

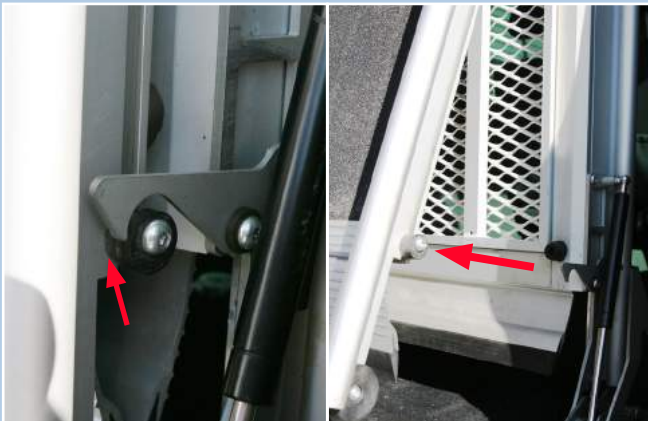

Rampe auf beiden Seiten lösen.

3



Einen Griff, um die Rampe ganz herunter zu klappen, befindet sich seitlich an der Rampe.



Um den Rollstuhl im mittleren Bereich des Fahrzeuges zu montieren, muss die hintere Sitzreihe und der Doppelsitz der mittleren Sitzreihe aus dem Fahrzeug genommen werden.



4

Kippen Sie die Sitzlehne nach vorne, indem Sie an dieser Schlaufe ziehen.



5


Um die Bodenverankerung zu lösen, kippen Sie die Sitzreihe nach vorne, indem Sie auf beiden Seiten gleichzeitig an den unteren Schleifen ziehen.

Um den Sitz ganz aus der Verankerung zu nehmen, muss, im nach vorne geklappten Zustand, nochmals an den beiden Schleifen gezogen werden.



6

Nun kann auch die Zweiersitzreihe entfernt werden. An dieser Stelle befestigen Sie dann den Rollstuhl.

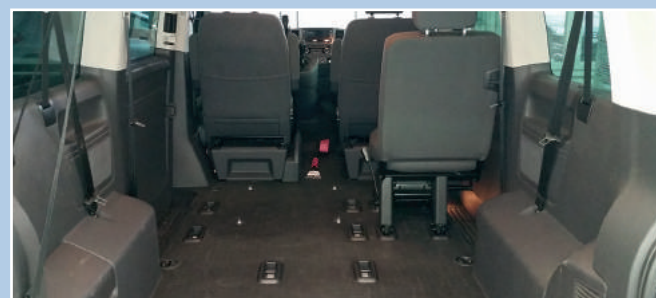

7




8



Platzieren Sie den Rollstuhl an der vorgesehenen Stelle und ziehen Sie die Bremsen des Rollstuhls fest.
(Dies kann auch später gemacht werden.)

9

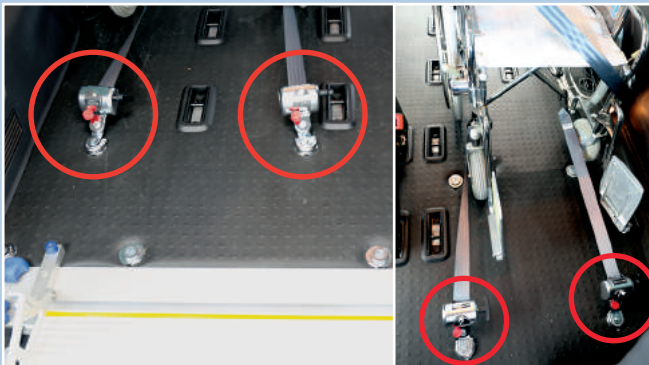

Befestigen Sie nun die Retraktoren, welche Sie in der grauen Kiste finden, an den dafür vorgesehenen Stellen.


Vergessen Sie nicht die Bremsen des Rollstuhls vorher zu arretieren.

10



Ziehen Sie die vorderen beiden Gurten aus dem Retraktor und befestigen Sie diese am FESTEN und SICHEREN Rahmen des Rollstuhls, nicht an den Rädern!

11

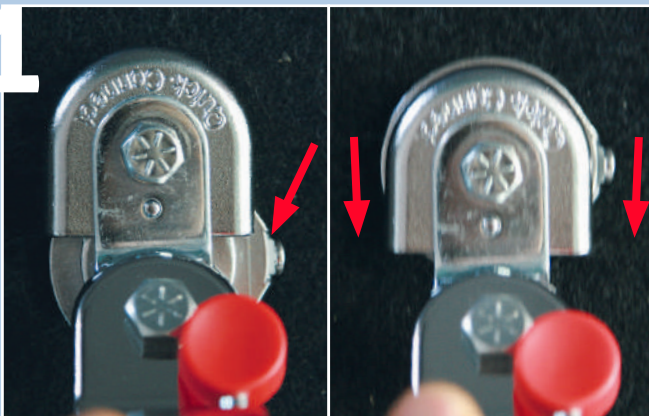


Achten Sie darauf, dass der Sicherungsrippel auf der rechten oder linken Seite steht.


Rasten Sie den Retraktor wie bei einer Schiene am Bodenpunkt ein.



Drehen Sie die Halterung so, dass der Retraktor durch den Nippel gesichert ist.

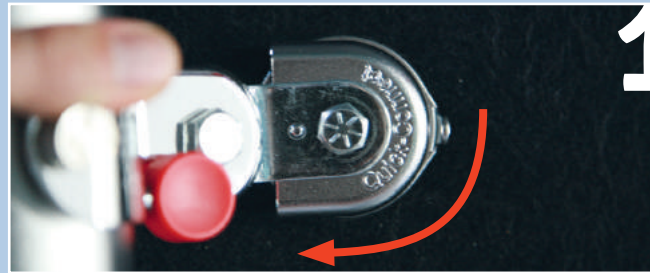

Befestigen Sie die Gurten in einer geraden Linie zu den Retraktoren so, dass bei einem abrupten Zug nur am massiefen Rahmen des Rollstuhls gezogen wird.

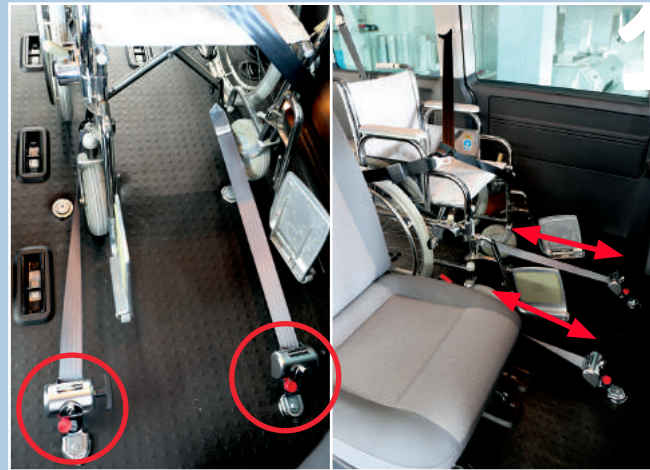

Die angezogenen Gurten können durch Drücken des roten Knopfes am Retraktor wieder gelöst werden. Angezogen werden sie mit dem schwarzen, seitlichen Griff.





15




In der grauen Kiste finden Sie dieses Gegenstück der Gurte.

16



Klicken Sie diese Gurte hinten rechts in den Retraktor ein.

17

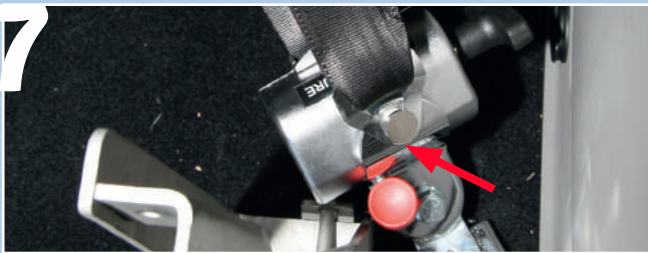

Die Gurte kann ganz leicht in den Retraktor eingerastet werden.

18



Die vorhandene Gurte kann nun in das Gegenstück aus der grauen Kiste gesteckt werden.

